

**HYGIÈNE DES ÉLEVAGES  
VOLAILLES CHAIR AVANT ABATTAGE**

- Navette  
 La Poste

Client..... Transporteur .....  ATB  ANSES

**INUAV** : .....

**N° Bâtiment** : ..... **N° Lot** : .....

**ELEVEUR** Nom / Prénom  
.....  
Adresse : .....  
.....  
E-mail : .....  
.....

**Organisme de production** : .....

**Préleveur** : .....  
E-mail : .....

**Vétérinaire sanitaire** : .....  
E-mail : .....

**ESPÈCE** :  Poulet de chair  Dinde  
 Pintade  Canard  Autre : .....

**DATE DE PRÉLÈVEMENT** : ...../...../.....

**Prélèvements à envoyer au laboratoire dans les 24 h après réalisation.**

COUVOIR d'origine : .....

DATE de mise en place : ...../...../.....

**ÂGE des animaux (jours)** : ..... Nombre : .....

DATE prévue d'abattage : ...../...../.....

**NATURE PRÉLÈVEMENT** :

2 paires de Pédichiffonnettes  
*(réunies en un seul contenant à l'élevage)*

2 chiffonnettes *si animaux traités*  
*(réunies dans un seul contenant à l'élevage)*

*(Description de la méthode de prélèvement au dos de cette feuille)*

**EXAMENS DEMANDÉS** :

Salmonella (tous sérotypes)\* *Norme NF U 47-100 avec une méthode d'enrichissement, annexe D ISO 6579.(Dinde et poulet de chair)*

Salmonella (tous sérotypes)\* *Norme NF U 47-100 avec 2 méthodes d'enrichissement*

Accréditation n°1-7015 Essais (analyses sous couvert de l'accréditation COFRAC repérées par le symbole \*, sous réserve du domaine d'application de la méthode).

**FACTURE A** :  Eleveur  Autre  
Autre : .....

**DUPLICATA RÉSULTATS**

Prélevé  Organisme  Autre  
Autre : .....

Bon pour accord du demandeur :

Nom: ..... Signature : .....

Date : .....

Prise en charge à LABOCEA par :

Le : .....  
*Hygiène des Élevages*

INUAV .....	Type prélèvement	Etiquette	Toutes Salmonelles	S.Enteritidis, S.Typhimurium, S.Kentucky à renseigner si présence d'une différente de SE ST SK	LNR	ANSES	Retour ANSES
Réf. Prélèvement							

Résultat partiel le : ...../...../..... Par : ..... Saisie le : ...../...../..... Par : .....

Résultat complet le : ...../...../..... Par : ..... Saisie le : ...../...../..... Par : .....

CT : .....

## COMMENT PRÉLEVER AVEC 2 PAIRES DE CHAUSSONS :


Les dispositifs pour contrôle de surface doivent être stockés et transportés avec précaution dans des conditions protégeant des contaminations extérieures : emballage réservé uniquement à ces dispositifs.




**1** Enfiler les surbottes en plastique une fois arrivé dans le poulailler



**2** Se désinfecter soigneusement les mains puis enfiler les gants

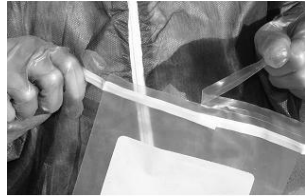

**3** Déchirer le haut du sachet

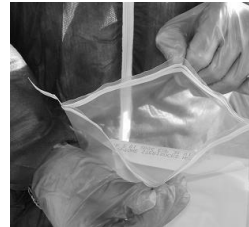

**4** Ouvrir le sachet en saisissant les languettes



**5** Prendre les chaussons dans le sachet



**6** Enfiler une première paire de Sterisox



**7** Enfiler la deuxième paire de chaussons par-dessus les autres



**8** Conserver le sachet de prélèvement



**9** Marcher sur la litière au minimum 3 minutes sur toute la longueur du bâtiment



**10** Récupérer les 2 premiers chaussons imprégnés de fientes et les placer dans le sachet



**11** Marcher sur la litière avec la paire restante



**12** Retirer les 2 derniers chaussons et les joindre aux précédents dans le sachet de prélèvement



Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler.



**13** Bien chasser l'air présent dans le sachet.  
Puis enrouler le haut du sachet 4 fois vers vous



**14** Replier les languettes latérales pour assurer l'étanchéité



**15** Retirer les gants et identifier le sachet de prélèvement (nom de l'élevage)

### **ENVOI DANS LES 24H A LABOCEA :**

Par courrier postal :  
Placer le sachet de prélèvement dans un sachet extérieur bien fermé, puis, le placer dans l'emballage postal fourni par Laboceca.